

DISPOZITIV DE ASISTENȚĂ LA FĂTARE VINK – STANDARD CU TRACȚIUNE ALTERNATIVĂ(1045,1046)



Acest dispozitiv de asistență este ușor de manevrat

- Montajul se face pe partea din spate a vacii, pentru a putea asista vaca și vițelul.
- Dispozitivul trebuie așezat astfel încât să se poată mișca în această poziție. Astfel, veți avea ambele mâini libere pentru a ajuta vaca și vițelul.
- După aceea, legați frânghiile de cele două picioare ale vițelului și de mecanismul pârgheii, urmând această ordine.
- Acum testați ușor frânghiile pentru a prinde poziția corectă, atât cu vaca în picioare, cât și culcată.

În cazul unei prezentări normale

- Persoana care asistă trebuie să tragă în jos, în direcția ugerului, până când capul a ieșit, apoi să continue în poziție orizontală.
- Când pelvisul vițelului amenință să se blocheze în pelvisul vacii, trebuie tras mai mult spre uger.

În cazul unei prezentări posterioare

- Trageți în sus, în direcția spatelui, până când au ieșit picioarele, apoi continuați în poziție orizontală.

Eliberare rapidă

- Apăsați cuiul (pistonul) C și, cu aceeași mână, împingeți mecanismul spre vacă.
- Mâna liberă trebuie împinsă înainte, iar mecanismul se va elibera automat în poziția de mijloc.
- **Nu apăsați cuiul.**
- Dacă frânghiile sunt foarte tensionate, trageți mânerul înapoi pentru a permite cuiului C să se elibereze mai ușor.

Mecanismul de pârghie al dispozitivului VINK, cu tracțiune alternativă, este prevăzut cu 2 cârlige care se pot mișca alternativ.

Distanța dintre cârlige este de aproximativ 7 cm la fiecare tragere.

Nodurile sunt fixate la aceeași distanță pe frânghii pentru a se asigura că tracțiunea este distribuită uniform pe ambele picioare.

Exemplu:

- Frânghia roșie pentru cârligul din față (A): noduri la 30 și 43 cm.
- Frânghia albastră pentru cârligul din spate (B): noduri la 37 și 50 cm.

AVERTISMENT!

Când vaca este în picioare în timpul fătării, aceasta se poate culca brusc; în acest caz, se poate lovi în zona laterală.

Noi furnizăm dispozitivul VINK cu mecanism de pârghie și frânghii albe.

Dumneavoastră puteți stabili care trebuie să fie distanța dintre noduri.

Distanța dintre noduri trebuie să fie aceeași pe ambele frânghii pentru a asigura o tracțiune egală pe ambele picioare ale vițelului.